



FR

KOBA VISION

SenseView P430



Manuel

1. SenseView P430 – Contenu

- P430
- Adaptateur courant alternatif – bloc d'alimentation (chargeur de batteries)
- Livret de l'utilisateur
- Sac
- Courroie

2. Usage de pile/Entretien

- Avant l'utilisation du P430 pour la première fois, la pile doit être chargée pendant 3 heures. Il faut connecter l'adaptateur fourni afin de charger la pile. Vous pouvez l'utiliser pendant 5h et son temps de recharge n'est que de 3h.
- Avant d'utiliser le P430, enlever la couverture protectrice en plastique de l'écran d'affichage à cristaux liquides.
- Pour éviter des dommages aux composants électriques internes, il faut seulement utiliser le chargeur fourni.
- Pour éviter feu ou choc électrique, ne pas exposer le P430 à l'eau ni à l'humidité.
- Ne pas démonter le P430. Les réparations devraient être seulement complétées par le personnel qualifié de service.
- Après 6 à 12 mois, la durée de vie de la pile peut commencer à diminuer.
- Quand le P430 est éteint, le P430 rappelle les dernières images qui ont été utilisées pour la couleur, le zoom et l'éclat. Quand le P430 est encore allumé, les dernières images qui ont été utilisées seront restaurées.

3. Boutons et opération

- A. Interrupteur marche-arrêt: Glisser en bas et relâcher le bouton afin d'allumer/éteindre le P430. Quand le P430 est allumée, le micro logo sera affiché sur l'écran pour environ 2 secondes. Après que le logo disparaît, le P430 est dans le mode de grossissement, et prêt à être utilisé.
- B. Le zoom: En appuyant sur les boutons pour faire un zoom vers/hors (+/-) on peut contrôler le taux de grossissement.


Voir ci-dessous:

Etape	Pieds dépliés	Pieds pliés
1	4.7	6.7
2	6.0	8.0
3	6.8	9.5
4	8.4	11.6
5	9.5	13.0
6	10.3	13.6
7	11.9	15.8
8	13.6	19.0
9	15.8	22.5

- C. La SenseView peut immobiliser des images pendant quelques minutes pour en permettre une analyse plus pointue. Pour immobiliser une image, appuyer sur le bouton a cet effet. Appuyer sur le bouton une deuxième fois pour sortir de ce mode.
- D. Indicateur d'appareil photo: Cette lumière indique la position de la lentille d'appareil photo. L'indicateur clignotera quand le P430 sera dans le mode d'économie. (Ce sera expliqué dans section 4 de ce manuel de l'utilisateur)
- E. Helderheid knop: hiermee kan u het scherm donkerder en lichter maken in 4 stappen. Wanneer u op stap 4 bent, kan u door opnieuw te drukken terug naar stap 1 gaan.
- F. Vidéo externe: En option vous pouvez utiliser une caméra externe qui vous permettra de prendre des notes ponctuelles. (acheté séparément)
- G. La SenseView vous propose 6 combinaisons de couleurs (pour le fond du document et des caractères), à vous de choisir celle qui vous convient le mieux pour une lecture facilitée. Ce bouton change la couleur sur l'écran:
- Rendu des couleurs
 - Lecture en négatif
 - Lecture en positif
 - Jaune – bleu
 - Bleu – jaune
 - Bleu – blanc

Si vous appuyez encore sur le bouton au mode 6, il retournera au mode 1.


- H. Courant continu: Connecter ici pour charger la pile.
- I. Poignée Glissante: La poignée glissante est utilisée pour empêcher votre main de couvrir la vue de l'écran.
- J. Fermeture à lanière: Pour attacher la courroie.

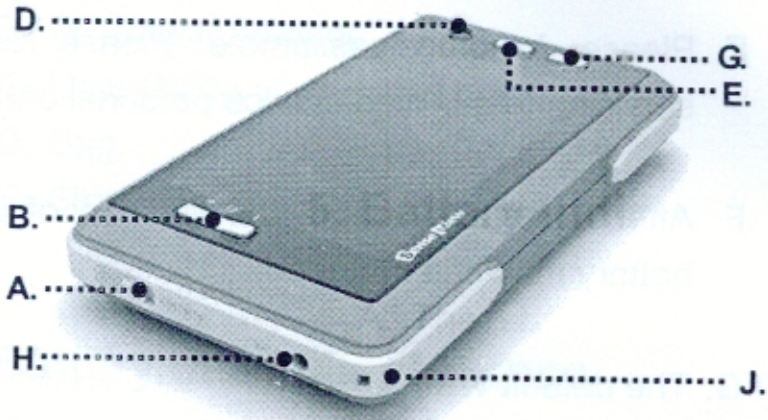

4. Mode d'économie

- Si le P430 est allumé, et ne se déplace pas pendant 3 minutes, le mode d'économie s'activera. Dans ce mode, le rétroéclairage de l'écran sera éteint.
- Pour sortir du mode d'économie, appuyer sur n'importe quel bouton ou déplacer le P430.
- Si le P430 reste dans ce mode pendant 7 minutes, la loupe sera automatiquement éteinte. Pour utiliser encore, allumer le P430 utilisant l'interrupteur marche-arrêt.

5. Icône d'indicateur de pile

- L'icône d'indicateur de pile indique combien il reste de courant. Quand la pile est entièrement chargée, trois blocs seront affichés. Si la pile a besoin d'être rechargée, l'icône d'indicateur de pile clignotera. 
- Pour voir l'icône d'indicateur de pile, appuyer sur le bouton de Mode de Couleur et faire un zoom vers (-) simultanément. Si vous appuyez encore sur les deux boutons, l'icône disparaîtra.
- L'icône d'indicateur de pile est rouge pendant que le P430 est chargé. Quand le P430 est entièrement chargé, l'icône est de couleur verte.
- Si l'adaptateur de courant alternatif est débranché du P430, l'icône est de couleur bleue.

6. Interrupteur marche-arrêt

- En appuyant sur le bouton, on entend un son.
- Pour éteindre ces sons, appuyer sur le Zoom vers (+) et sur les boutons d'éclat simultanément.

7. Spécification

- La SenseView est dotée d'un écran 16/9e de 110mm de diagonale qui vous permet ainsi de lire plus d'informations.
- Agrandissements: de 4.7 à 22.5 fois
- Luminosité: Niveau 1 à 4
- Caméra couleur: 6 couleurs
- Option: caméra externe
- Type de pile: Rechargeable de lithium

- Autonomie: 5h
- Temps de recharge: 3h
- Poignée glissante
- Dimensions: 83x146x22.5 mm
- Poids: 221g

8. Garantie – 1 année (Sauf la pile)

Garantie – 1 année (Sauf la pile)

KOBA Vision

De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

Tel. +32 11 344513

Fax +32 11 348525

info@kobavision.be

<http://www.kobavision.be>