


6 HD Clover

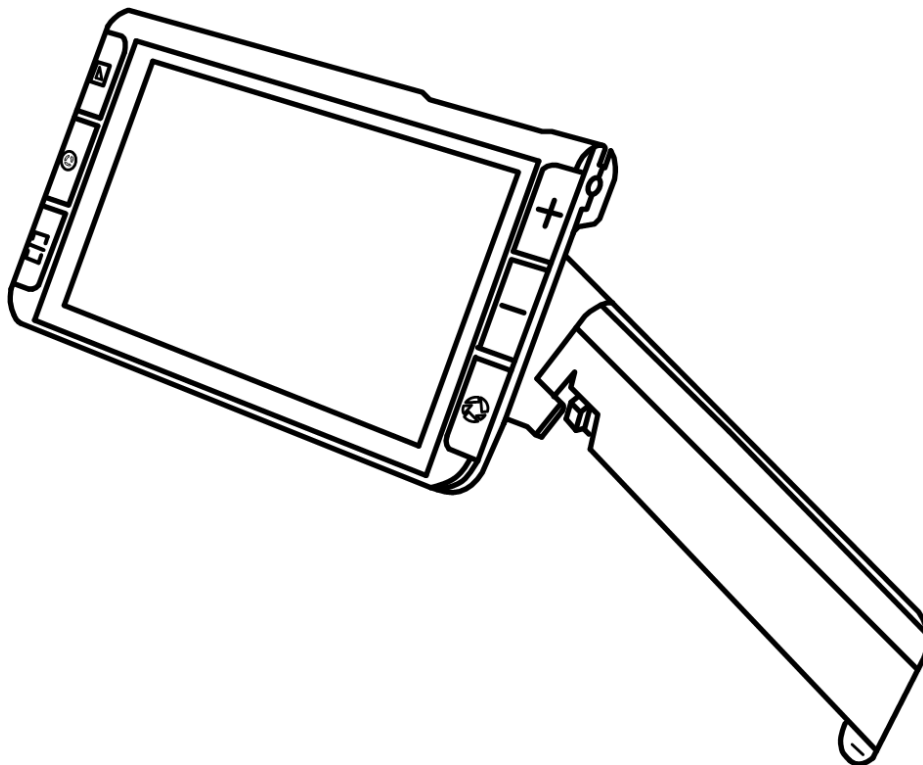



Nederlands – Gebruikshandleiding - Pagina 1
Français - Mode d'emploi - Page 9

Veiligheidsvoorschriften

- Alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken, dien je de batterij te laden.
- Gebruik het toestel enkel wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10° en 35° ligt.
- Stel het toestel nooit bloot aan regen, vochtige omgevingen of andere vloeistofbronnen. Dompel het toestel nooit onder.
- Gebruik enkel de meegeleverde adapter en batterij.

Snel start

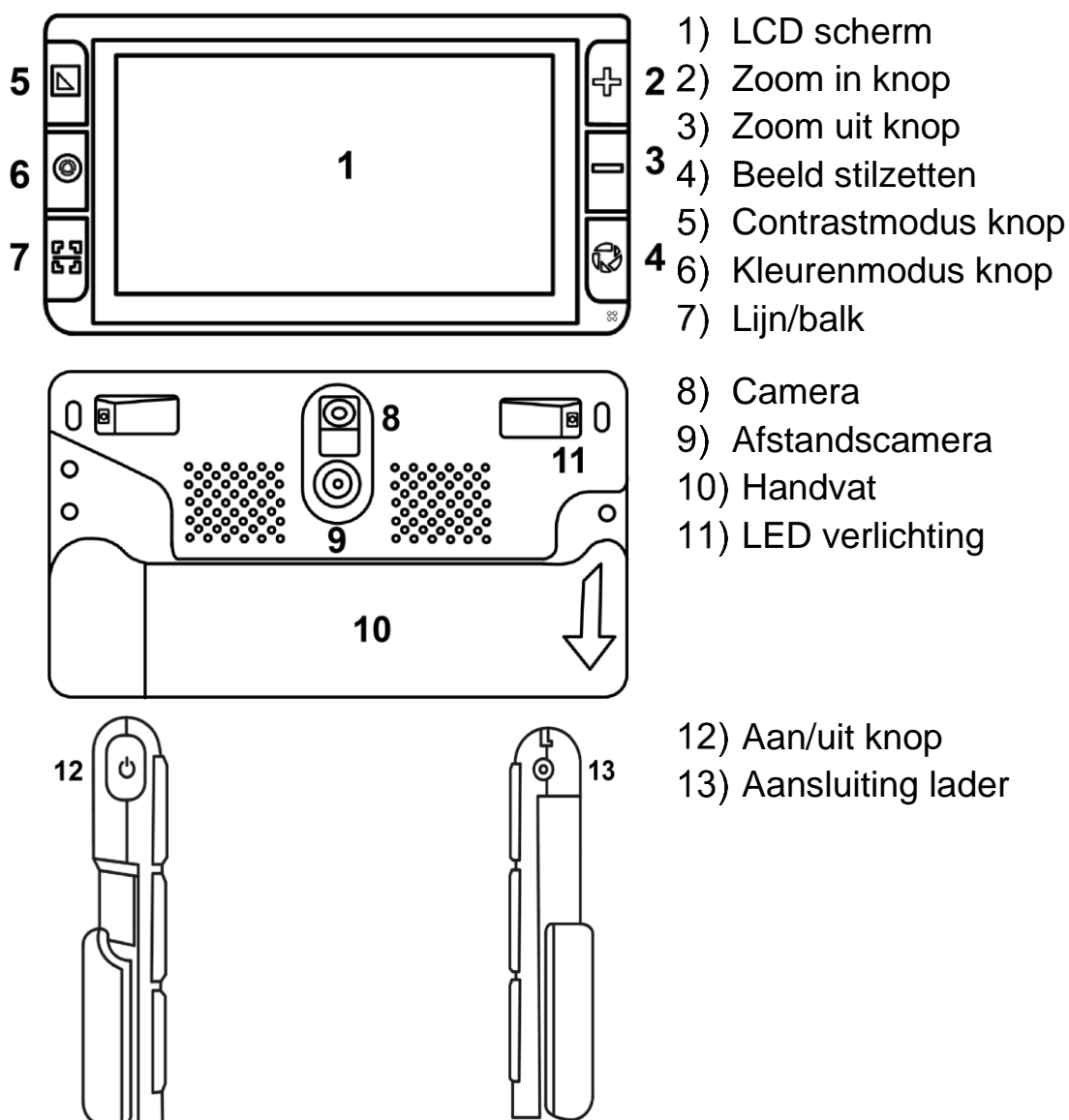

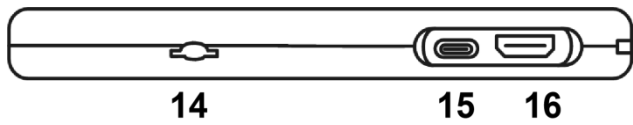

14) Micro SD kaart slot

15) USB-C poort

16) HDMI


Accessoires

- Adapter
- Hoesje
- HDMI kabel

Batterij en laden

BATTERIJ LADEN

- Verbind de kabel met de laadpoort op de loep.
- Steek de adapter in het stopcontact.

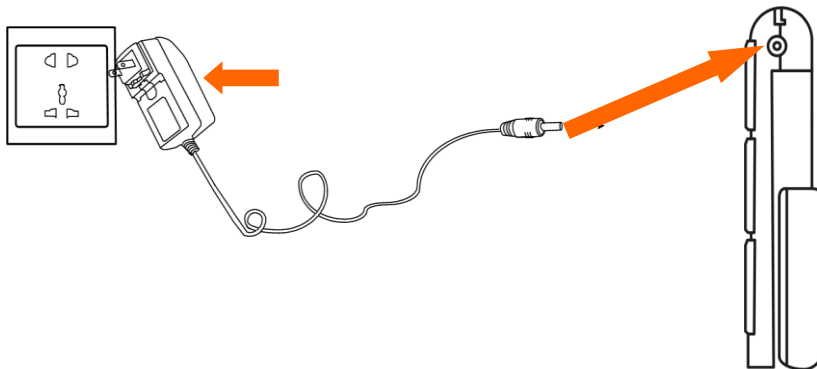


LAADSTATUS BATTERIJ

- De power led is groen wanneer je het toestel laadt terwijl het is uitgeschakeld. Wanneer het toestel volledig is opgeladen valt deze uit.
- Bij het laden terwijl je het toestel gebruikt, zal deze eveneens groen zijn.

- Wanneer je het toestel gebruikt en de lader is niet aangesloten, zal de power led groen branden wanneer de batterij voldoende geladen is. Wanneer de batterij bijna plat is, zal deze rood branden. Wanneer de power led rood begint te flikkeren, moet de batterij geladen worden.
- Je kan ook steeds de status van de batterij opvragen door de aan/uit knop ingedrukt te houden.


Leesstand

Open de leesstand zoals aangeduid op de afbeelding hieronder. Nu kan u onder de camera schrijven.

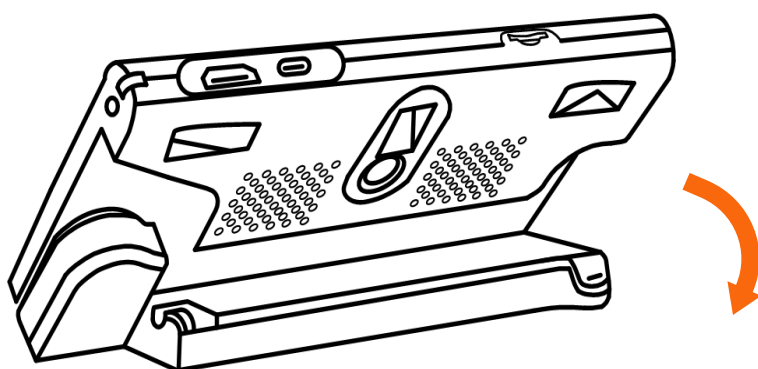


Handvat

Roteer het handvat zoals hieronder afgebeeld.

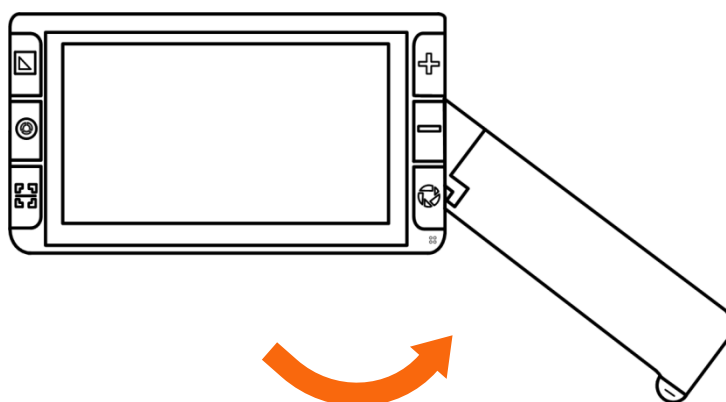

Wanneer je het handvat draait zoals hieronder zal het toestel automatisch schakelen naar dichtbij-modus.

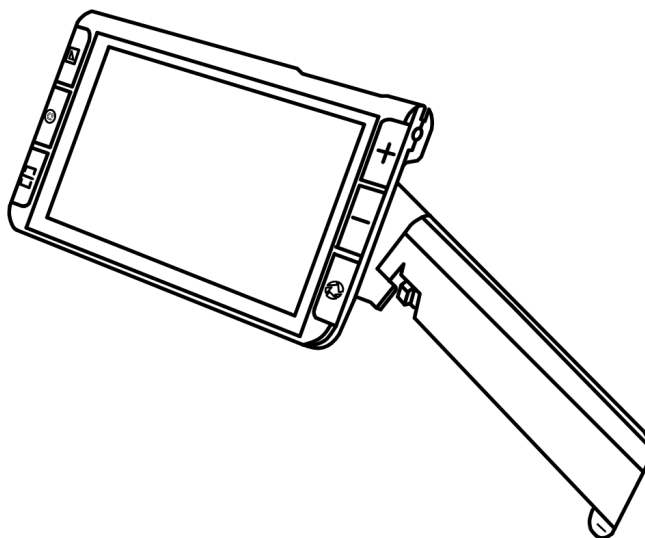

Bediening

AAN/UIT KNOP

- Druk de aan/uit knop gedurende 3 seconden in om het toestel aan of uit te zetten.
- Druk op de aan/uit knop om de status van volgende zaken te bekijken/regelen: batterij, helderheid, geluid, autofocus, verlichting, vibratie en stroombesparing.
- Druk nogmaals op de aan/uit knop om het menu te verlaten.

VERGROTING

- In- en uitzoomen kan in stappen of continu. Druk kort voor stapsgewijs en lang voor continu.
- Je kan eveneens in- en uitzoomen en navigeren m.b.v. het touchscreen.
- Tik tweemaal centraal of aan de zijkant om snel naar de betreffende positie te springen bij een vergroot beeld.

KLEUREN

- Een contrastmodus is een voor gedefinieerde kleurencombinatie. Kleurenweergave is geschikt voor het bekijken van foto's, kaarten. De hoog contrast modi worden gebruikt om teksten beter te kunnen lezen.
- Druk op de contrastmodus knop om de verschillende combinaties te doorlopen.

- Druk 3 seconden op de contrastmodus knop om bepaalde kleurencombinaties te activeren of te deactiveren.

HELDERHEID

Je kan de helderheid van het scherm aanpassen in het menu of zoals hieronder beschreven:

- Meer helderheid: druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de zoom in + knop
- Minder helderheid: druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de zoom uit - knop

VERLICHTING

Je kan de LED verlichting in- en uitschakelen door tegelijkertijd te drukken op de aan/uit knop en de stilstaand beeld knop .

STILSTAAND BEELD

- Druk op de stilstaand beeld knop om een beeld vast te zetten.
- Druk nogmaals om dezelfde knop om terug naar het live beeld te gaan.
- Navigeren op het stilstaande beeld kan d.m.v. het touchscreen.

FOTO'S OPSLAAN

Je kan een foto opslaan door 3 seconden op de stilstaand beeld knop te drukken.

Daarna kan je hier nog een gesproken boodschap aan toevoegen door op het microfoon icoon te drukken en ingedrukt te houden tot de boodschap beëindigt is.

Je kan de boodschap herbeluisteren door op het play icoon te drukken of door op de stilstaand beeld knop. Je kan desgewenst ook een nieuwe boodschap inspreken maar enkel de laatste zal opgeslagen worden.

Wanneer het 2GB geheugen vol zit zal dit op het scherm getoond worden en zal je foto's moeten verwijderen in het playback menu.

PLAYBACK

- Druk gedurende 2 seconden op de kleurenmodus knop om de fotogalerij te bekijken.
- Druk op de betreffende foto op het scherm of navigeer er naartoe om de gesproken boodschap te beluisteren. Tik nogmaals op de afbeelding of op de stilstaand beeld knop om deze volledig te tonen.

- In de fotogalerij kan je eveneens foto's verwijderen door op het vuilnisbak icoon te drukken en dit nogmaals te bevestigen of door op de lijn/blak knop te drukken en nogmaals te bevestigen.
- Alle foto's tegelijkertijd verwijderen kan door in de galerij 5 seconden op het vuilnisbak icoon of de lijn/balk knop te drukken en daarna nogmaals te bevestigen.

LIJN/BALK


Druk op de lijn/balk knop om te wisselen tussen de verschillende leeslijn en de balk modi. De verschillende mogelijkheden zijn:

- Enkele horizontale lijn
- Enkele verticale lijn
- Horizontale balk
- Verticale balk

Je kan de positie van de lijn en balk en de breedte hiervan aanpassen door op de lijn/blak knop te drukken en tegelijkertijd naar links/rechts te bewegen op het scherm of naar boven/onder.

TV AANSLUITING

Met de meegeleverde HDMI kabel kan je het toestel verbinden met je TV toestel.

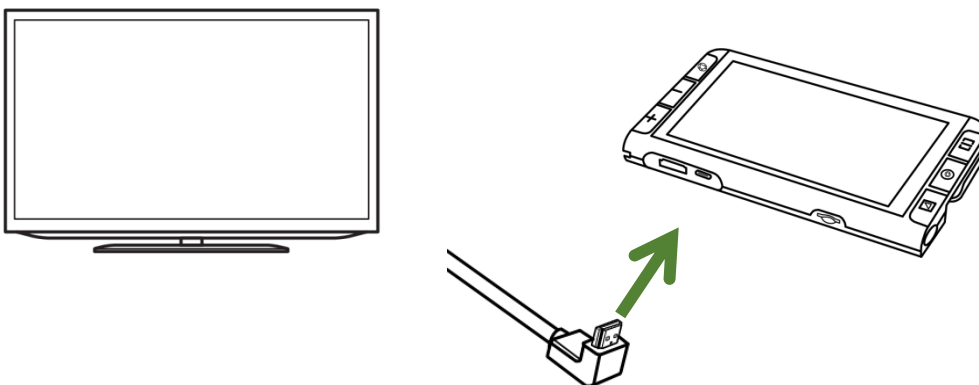

Geheugen

Het toestel slaat automatisch de laatste setting op wanneer het toestel wordt afgesloten.

Fabrieksinstellingen

Druk tegelijkertijd op de stilstaand beeld knop en de lijn/blak knop gedurende 3 seconden om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

Reset

Wanneer het toestel vastgelopen is, druk dan tegelijkertijd op de aan/uit knop + de stilstaand beeld knop + de uitzoom knop totdat het toestel uitgeschakeld wordt.

Automatische stroombesparing

Wanneer er gedurende 5 minuten niets met het toestel gedaan wordt, sluit het vanzelf af.

Probleemoplossing

Het toestel gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de adapter aan• Zorg ervoor dat de batterij geladen is
Volledig zwart of wit scherm	<ul style="list-style-type: none">• Ligt het scherm op een vlak oppervlak? Zo ja, neem het toestel op en kijk of er iets verandert.• Pas de vergroting aan• Wijzig de kleurenmodus• Wanneer het toestel met een TV is verbonden, is het scherm altijd zwart• Herstart het toestel
Het beeld verandert niet	<ul style="list-style-type: none">• Kijk of het beeld niet in de stilstaand beeld mode staat• Druk op de aan/uit knop om de huidige status te checken• Herstart het toestel
Troebel beeld	<ul style="list-style-type: none">• Pas de helderheid aan• Is het scherm proper?

Garantiebepalingen

- De garantie bedraagt 2 jaar vanaf de aankoopdatum exclusief de batterij.
- De batterij heeft een garantieperiode van 6 maanden.



Specificaties

- Display: 5,5 inch FHD LCD
- Afmetingen: <=160*91*21mm
- Gewicht: 265gram
- Kleurenmodi: 16 modi
- Vergroting: 2x – 35x
- Batterij: herlaadbare en uitneembare Lithium batterij
- Gebruiksduur bij volledig geladen: +/- 3u
- Laadtijd: +/- 2.5u
- Adapter: input 110-240V, output 5V/3A

Précautions


- Avant d'utiliser Clover 6 pour la première fois, vous devez recharger sa batterie.
- Toujours utiliser l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F).
Gardez l'appareil à l'écart des zones humides, de la pluie et d'autres sources de liquides. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Cela annulera la garantie. Contactez votre distributeur pour toute réparation.
- Merci d'utiliser adaptateur secteur et la batterie fournis.
- Chargez la batterie sur une base inflammable et sous supervision.

Démarrage rapide

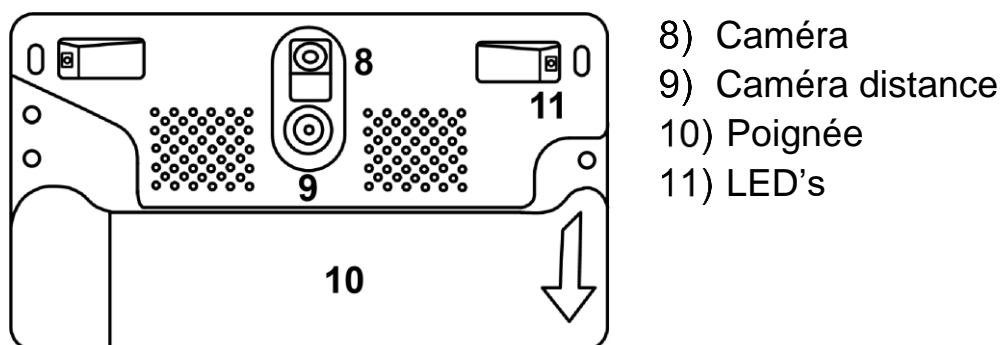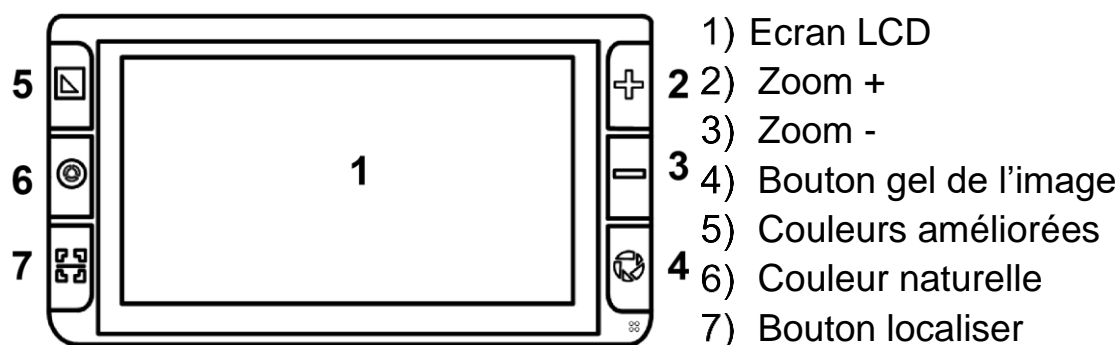




12) Bouton power (marche, arrêt)

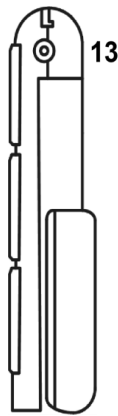

13) Prise de charge

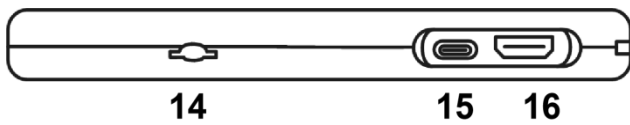

14) Carte micro SD

15) Port USB-C


16) Port HDMI

Accessoires

- Adaptateur
- Câble HDMI
- Housse de transport

Chargement de la batterie

1. Branchez le câble d'alimentation fourni au secteur.
2. Connectez le câble d'alimentation fourni au port d'alimentation de la loupe.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur et commencez à recharger.

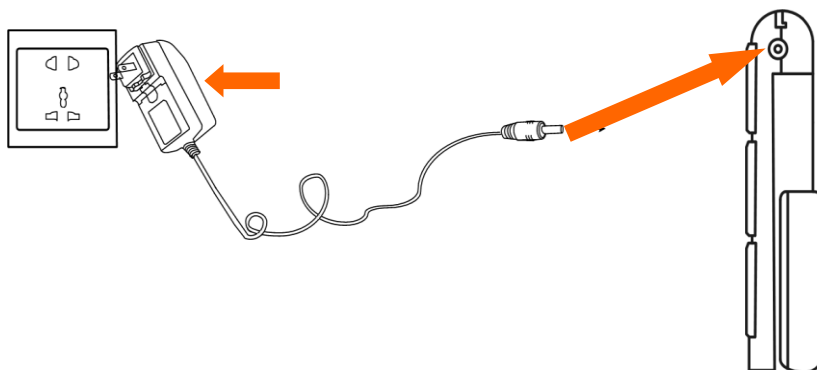

Témoin lumineux


- Chargement de l'appareil lorsqu'il est éteint : le témoin lumineux est vert, puis s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé. Une charge complète prendra environ 2,5 heures. Et l'appareil fonctionnera pendant environ 3 heures en utilisation continue.
- Lorsque l'appareil est allumé : le témoin lumineux est vert lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur.
- Lorsque l'appareil est allumé et que l'adaptateur secteur n'est pas branché : le témoin d'alimentation est vert lorsque la batterie est pleine et il devient rouge lorsque la batterie est faible.

Lorsque le témoin rouge commence à clignoter, vous devrez charger la batterie.

Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie en appuyant sur le bouton Marche/arrêt (Power).


Pied de lecture

Le pied repliable est utilisé pour une expérience confortable. Dépliez le support comme montré sur la figure suivante.

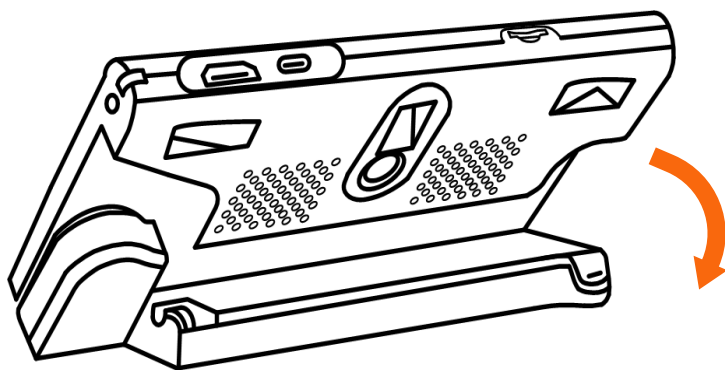


Poignée

Déployez la poignée comme ci-dessous.

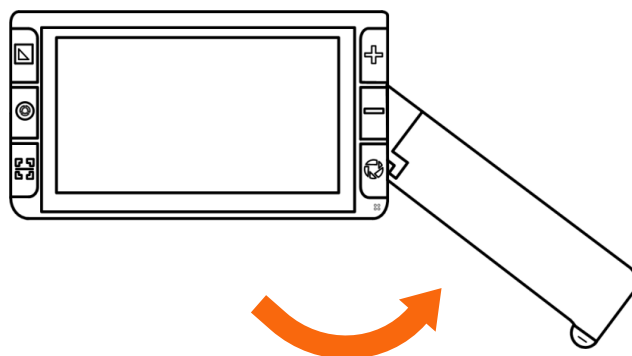

Quand vous tournez la poignée, le mode de vision de près sera activé.

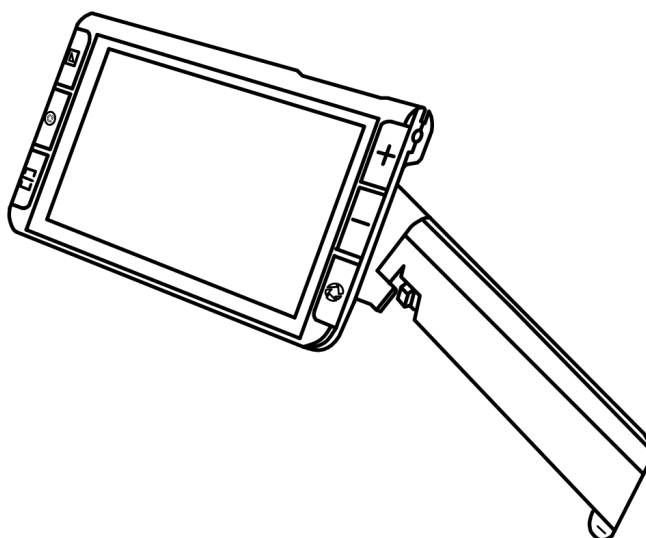

Utilisation de l'appareil

BOUTON POWER (MARCHE/ARRET)

- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.
- Faire un appui court sur le bouton Power pour vérifier l'état de la batterie, luminosité, autofocus, éclairage, vibration et des bips sonores

AGRANDISSEMENT

- Appuyez (appui court) sur le bouton Zoom plus pour augmenter le grossissement par paliers. Et si vous maintenez enfoncé (appui long) le bouton Zoom plus, vous augmentez le zoom plus rapidement (zoom progressif).
- Appuyez (appui court) sur le bouton Zoom moins pour diminuer le grossissement par paliers. Et si vous maintenez enfoncé (appui long) le bouton Zoom moins, vous diminuez le zoom plus rapidement (zoom progressif).
- On sait aussi utiliser l'écran tactile pour la navigation en l'agrandissement.
- Appuyez deux fois ou central ou à côté de l'écran pour naviguer vers cette position.

MODES DE COULEUR

- Un mode couleur est une combinaison de couleurs prédéfinie. Le mode couleur naturel est adapté pour regarder des images ou des photos, ou bien encore pour visualiser des cartes.
- Et le mode couleurs améliorées combine différentes couleurs de caractères et d'arrière-plan, il peut aider à lire plus clairement en améliorant le contraste.
- Maintenez le bouton Couleurs améliorées pendant 3 secondes, pour activer ou désactiver certaines combinaisons.

LUMINOSITE

Ajustement de la luminosité de l'écran, que ce soit en mode Couleur naturelle ou bien en mode Couleur améliorées

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power, puis appuyez sur le bouton Zoom plus pour augmenter la luminosité.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power, puis appuyez sur le bouton Zoom moins pour diminuer la luminosité.

ÉCLAIRAGE LED

Maintenez enfoncé le bouton Power et appuyez sur le bouton Gel de l'image pour allumer/éteindre manuellement les LED's.

GEL DE L'IMAGE

Le fait de figer une image (Gel de l'image), sur l'écran LCD, peut être utile pour une lecture plus approfondie et plus précise. Lorsque l'image est figée, vous pouvez augmenter ou diminuer le zoom, changer le mode couleur.

- Appuyez (appui court) sur le bouton Gel de l'image pour figer l'image.
- Appuyez à nouveau (appui court) sur le bouton Gel de l'image pour revenir au mode de lecture normal.

Remarque :

Lorsque vous avez gelé l'image, vous pouvez utiliser l'écran tactile pour naviguer librement dans la totalité de l'image figée (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite).

STOCKAGE D'IMAGES

Lorsque l'image est figée, maintenez le bouton Gel de l'image pendant 3 secondes pour enregistrer cette image.

Après vous pouvez encore ajouter une message vocale en appuyant sur l'icône microphone.

Lorsque vous avez atteint le nombre maximal d'images enregistrées (2GB), l'icône de la mémoire apparaît, vous devez donc d'abord supprimer une image, dans la Galerie d'images, avant la prochaine sauvegarde

GALERIE D'IMAGES

- Pour accéder à la galerie d'images, appuyez (appui long) sur le bouton Couleur naturelle pendant 2 secondes.
- Appuyez sur la photo sur l'écran ou y naviguez pour entendre la message vocal. Appuyez de nouveau sur la photo ou le bouton Gel d'image pour montrer l'image.

- Appuyez sur l'icône poubelle sur l'écran ou le bouton Localiser pour supprimer l'image. Appuyer de nouveau sur l'icône ou le bouton Localiser pour confirmer.
- Supprimer toutes les photos au même temps : appuyez sur l'icône poubelle ou le bouton Localiser pendant 5 secondes et confirmez après.

MODES LIGNE ET MASQUAGE

Appuyez sur le bouton Localiser pour basculer entre les modes de ligne et masquage.


Les différents modes de ligne et masquage sont :

- Une ligne horizontale
- Une ligne verticale
- Masquage horizontal
- Masquage vertical

Utilisez le bouton localiser et l'écran tactile (gauche/droite/haut/bas) pour changer la position de la ligne de lecture ou modifier l'écart entre les bandes de masquage.

CONNECTION TV

Vous pouvez connecter votre Clover 6 avec un écran externe avec le câble HDMI.

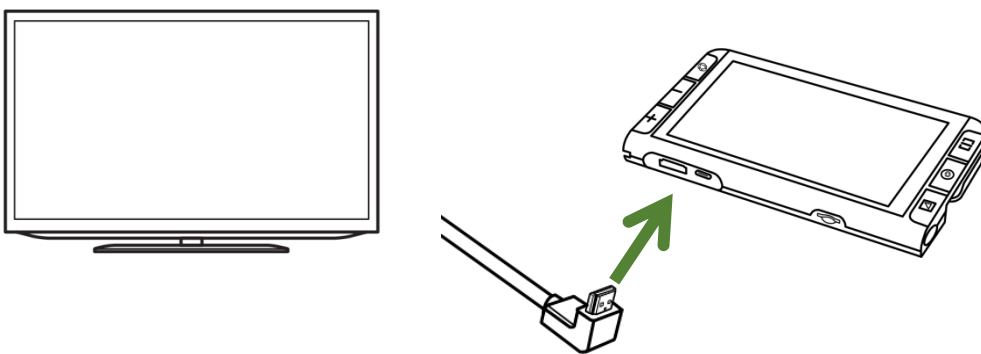

Mémorisation des paramètres

L'appareil mémorise automatiquement les derniers paramètres utilisateur (tels que le mode de couleur, le grossissement et les bips) lorsque vous éteignez l'appareil normalement. Et les réutilise lors du prochain redémarrage.

Restauration

Appuyez (appui long) sur le bouton Gel de l'image et le bouton Localiser, en même temps, pendant 3 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

L'appareil s'éteint automatique lorsque la réinitialisation est terminée.

Réinitialisation matérielle

Lorsque l'appareil est bloqué ou ne peut pas être arrêté normalement, appuyez simultanément sur le bouton Power, le bouton Zoom + et bouton gel d'image pour déclencher la réinitialisation matérielle.

Extinction automatique

En cas d'inactivité l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes, pour économiser la batterie.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">• Branchez l'adaptateur secteur.• Chargez la batterie.• Réinitialisation matérielle.
Ecran noir ou écran blanc	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil est posé sur une surface plane et que l'écran est noir ou blanc, soulevez l'appareil pour vérifier si cela change la situation.• Ajuster l'agrandissement.• Ajuster le mode de couleur.• Redémarrer la loupe.• Réinitialisation matérielle.
L'image ne change pas	<ul style="list-style-type: none">• Si l'appareil est en mode Gel de l'image ou en mode galerie d'images, l'image ne change pas.• Appuyez sur le bouton Power pour vérifier le gel de l'image et le mode de couleur.• Redémarrez la loupe.• Réinitialisation matérielle.

En cas de taches sur l'écran	<ul style="list-style-type: none">• Réglez la luminosité de l'écran.• Nettoyez l'écran LCD et la lentille photo située au dos l'appareil.
-------------------------------------	--

Garantie

Garantie 2 ans (LA BATTERIE EST GARANTIE 6 MOIS).

Caractéristiques techniques

- Taille de l'écran: 5,5 inch FHD LCD
- Dimensions: <=160*91*21mm
- Poids: 265grammes
- Modes de couleurs: 16 modes
- Agrandissement: 2x – 35x
- Batterie: rechargeable Lithium-ion intégrée. Environ 3h d'autonomie en utilisation continue. Charge complète environ 2,5h
- Chargeur: input 110-240V, output 5V/3A