




# Clover 10

---

Nederlands – Handleiding – Pagina 1

Français – Mode d'emploi – Page 10

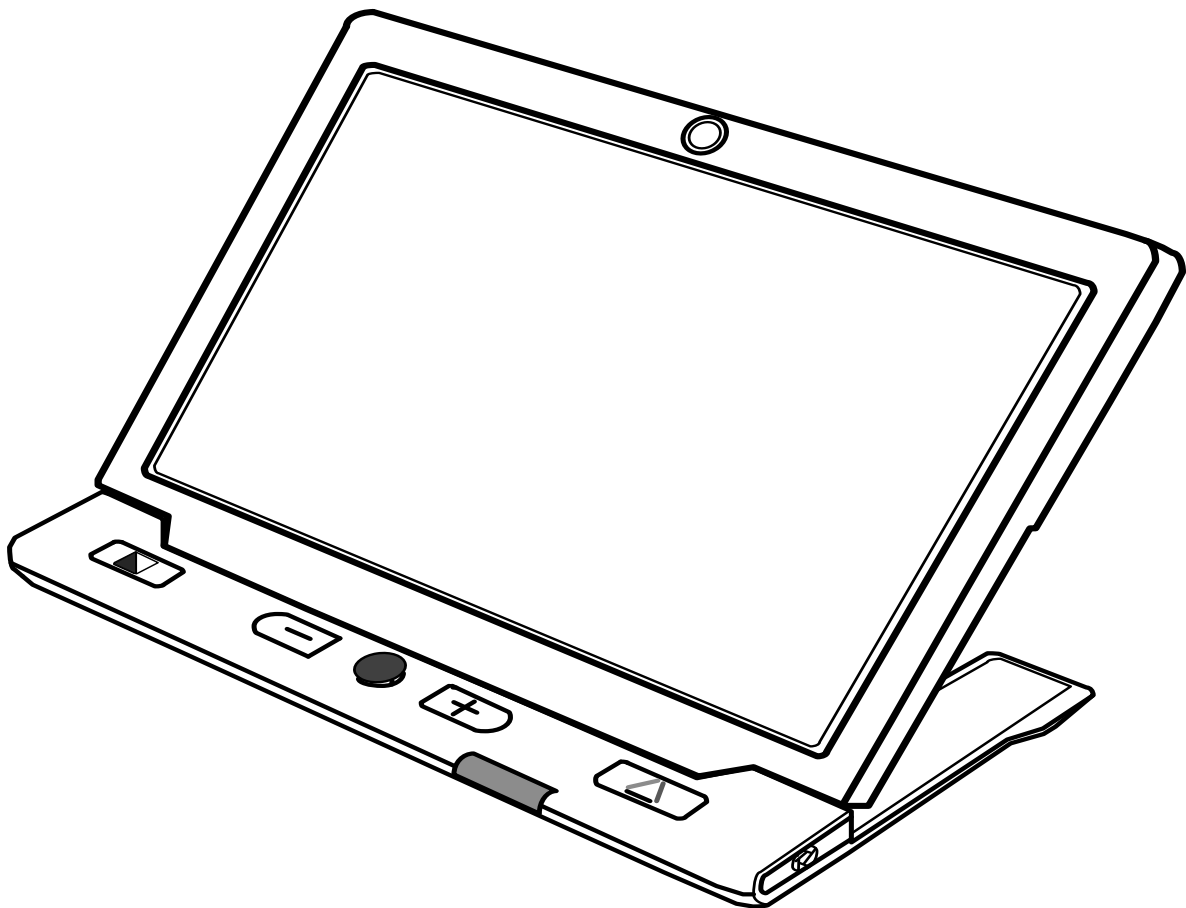

## **KOBA Vision**


De Oude Hoeven 6  
3971 LEOPOLDSBURG  
Belgium

Tel. 011 51 70 80  
info@kobavision.be  
www.kobavision.be


## Veiligheidsvoorschriften

- Alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken, dien je de batterij te laden. Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk “Batterij en Laden”.
- Gebruik het toestel enkel wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10° en 35° ligt.
- Stel het toestel nooit bloot aan regen, vochtige omgevingen of andere vloeistofbronnen. Dompel het toestel nooit onder.
- Gebruik enkel de meegeleverde adapter en batterij.
- De accu altijd plaatsen op een niet-brandbaar oppervlak gedurende het laden en altijd onder toezicht laden.


## Snel start

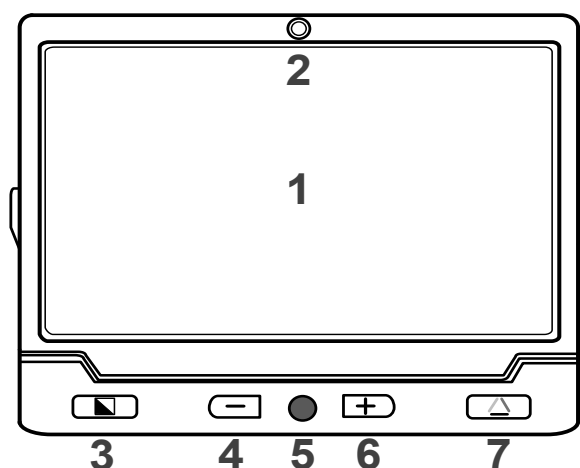


- 1) LCD scherm
- 2) Camera voorkant
- 3) Contrastmodi
- 4) Zoom uit knop
- 5) Joystick
- 6) Zoom in knop
- 7) Kleurenmodus

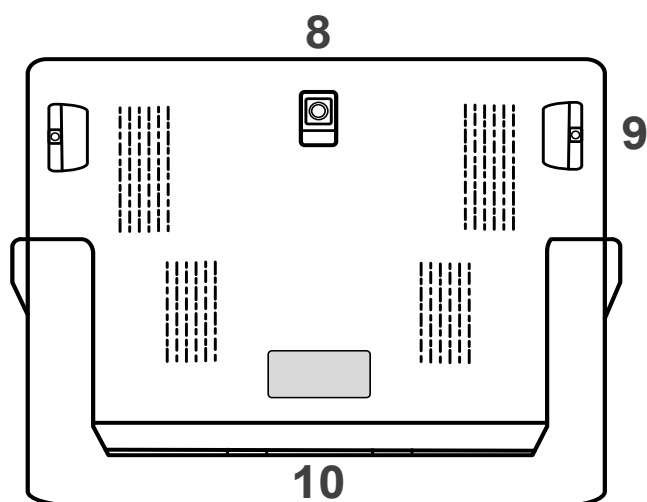

- 8) Camera achterkant
- 9) LED verlichting
- 10) Voet

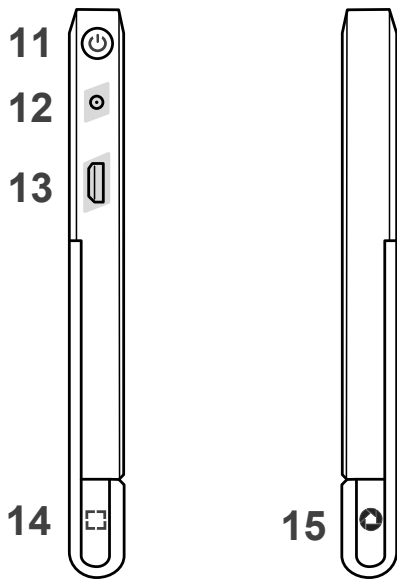

- 11) Aan/uit knop
- 12) Aansluitpunt adapter
- 13) HDMI uitgang
- 14) Lijn/balk
- 15) Beeld vastzetten

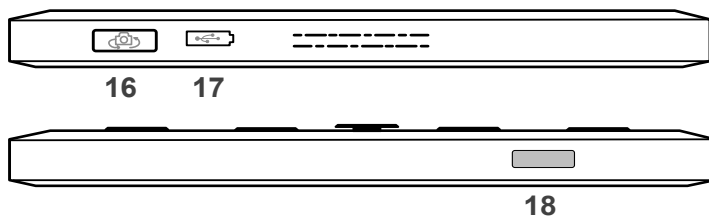


- 16) Camera wisselen
- 17) Micro USB
- 18) Focus lock


## Accessoires



Handleiding

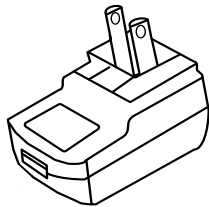


Power Adapter

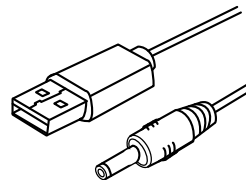


Power kabel



Reinigingsdoekje

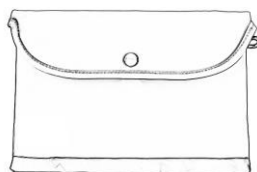

Hoesje

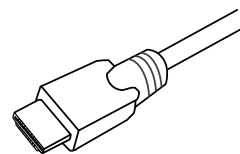


HDMI kabel

# Batterij en laden

## BATTERIJ LADEN

- Sluit de USB kabel aan op de adapter.
- Verbind de USB kabel met de micro USB poort op de loep.
- Steek de adapter in het stopcontact.

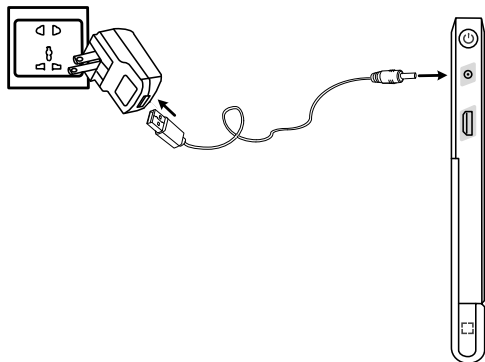


## LAADSTATUS BATTERIJ

- De power led is groen wanneer je het toestel laadt terwijl het is uitgeschakeld. Wanneer het toestel volledig is opgeladen valt deze uit.
- Bij het laden terwijl je het toestel gebruikt, zal deze eveneens groen zijn.
- Wanneer je het toestel gebruikt en de lader is niet aangesloten, zal de power led groen branden wanneer de batterij voldoende geladen is. Wanneer de batterij bijna plat is, zal deze rood branden. Wanneer de power led rood begint te flikkeren, moet de batterij geladen worden.
- Je kan ook steeds de status van de batterij opvragen door de aan/uit knop ingedrukt te houden.

## *Staande positie*

Open de voet zoals aangeduid op de afbeelding hieronder. Nu kan u comfortabel lezen en onder de camera schrijven. De camera draait automatisch mee met het open- en dichtklappen van de voet.

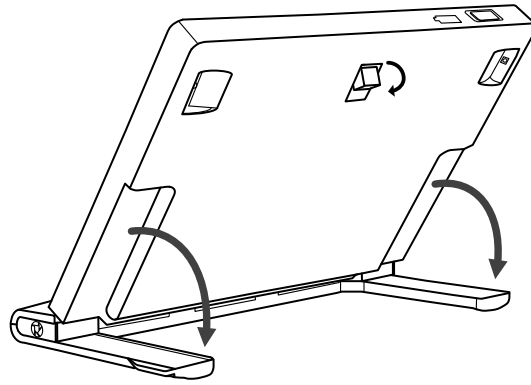


## **Bediening**

### **AAN/UIT KNOP**



- Druk de aan/uit knop gedurende 3 seconden in om het toestel aan of uit te zetten.
- Druk op de aan/uit knop om de status van volgende zaken te bekijken: batterij, kleurenmode, stilstaand beeld mode en geluid.

### **GELUID/BIEP**

- Aan/uit
- Knoppen
- Treshold
- Lage batterij stand

Je kan het geluid uitschakelen en terug aanzetten door de AAN/UIT knop in te drukken en tegelijk de kleurenmodus knop  in te drukken.




### **CAMERA WISSEL**

- Schuif de camera switch  naar links om de camera aan de achterkant te openen (macro en afstandsmode).
- Schuif de camera switch  naar rechts om de voorste camera te gebruiken in spiegelmodus.

### **VERGROTING**

- In- en uitzoomen kan in stappen of continu. Druk kort voor stapsgewijs en lang voor continu.

## KLEUREN

- Een kleurenmodus is een voor gedefinieerde kleurencombinatie. Kleurenweergave is geschikt voor het bekijken van foto's, kaarten. De hoog contrast modi worden gebruikt om teksten beter te kunnen lezen.
- Druk op de contrastmodi knop  om de verschillende combinaties te doorlopen.
- Druk op de kleurenmodus knop  om terug te keren naar de echte kleuren.
- Door 5 seconden op de contrastmodi  knop te drukken kan je schakelen tussen de uitgebreide kleurenmodi lijst en verkorte lijst. Dr

### Korte lijst

Kleurenweergave, Zwart op wit, Wit op blauw, Wit op zwart, Geel op zwart, Geel op blauw.

### Lange lijst

Kleurenweergave, Zwart op wit, Zwart op geel, Blauw op wit, Blauw op geel, Zwart op groen, Zwart op violet, Zwart op blauw, Groen op wit, Rood op wit, Wit op zwart, Geel op zwart, Wit op blauw, Geel op blauw, Groen op zwart, Violet op zwart, Blauw op zwart, Wit op groen, Wit op rood, Rood op zwart.

## HELDERHEID


Je kan de helderheid van het scherm aanpassen. De standaardwaarde wordt in een groene kleur aangegeven op het scherm.

- Meer helderheid: druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de zoom in + knop
- Minder helderheid: druk tegelijkertijd op de aan/uit knop en de zoom uit - knop

## VERLICHTING

Je kan de LED verlichting in- en uitschakelen door tegelijkertijd te drukken op de aan/uit knop en de stilstaand beeld knop .

## FOCUS LOCK


Druk op de focus lock knop  om de focus vast te zetten. Dit is vooral handig bij het schrijven.

## STILSTAAND BEELD

- Druk op de stilstaand beeld knop  om een beeld vast te zetten.

- Druk nogmaals op dezelfde knop om terug naar het live beeld te gaan.
- Navigeren op het stilstaande beeld kan je met de joystick.



## AFBEELDINGEN OPSLAAN



Je kan een foto opslaan door de stilstaand beeld knop  3 seconden ingedrukt te houden wanneer de foto reeds op het scherm staat.



Je kan maximaal 20 foto's opslaan. Wissen kan in de Playback mode.

## PLAYBACK MODE

Druk 3 seconden op de kleurenmodus knop om het Playback menu te openen.

Met de joystick kan je afbeeldingen selecteren die je wenst te bekijken. Druk vervolgens op de kleurenmodus knop  om de afbeelding te bekijken. Druk op de stilstaand beeld knop  om terug keren naar het overzicht.

Je kan specifieke foto's wissen door op de lijn/balk knop  te drukken wanneer je op een bepaalde foto staat. Door nogmaals op de lijn/balk knop  te drukken bevestig je het wissen.

Om alle afbeeldingen ineens te wissen druk je 5 seconden op de lijn/balk knop  in het overzicht venster. Door nogmaals op de lijn/balk knop  te drukken bevestig je het wissen.

Druk 3 seconden op de kleurenmodus knop  om uit de playback mode te gaan.

## TV AANSLUITING

Je kan het toestel verbinden met je TV toestel om alles in het groot te bekijken. Hiervoor gebruik je de meegeleverde HDMI kabel.

## LIJN/BALK


Druk op de lijn/balk knop om te wisselen tussen de verschillende leeslijn en de balk modi. De verschillende mogelijkheden zijn:

- Enkele horizontale lijn
- Enkele verticale lijn
- Horizontale balk

Je kan de positie van de lijn en balk wijzigen met de joystick.

Druk op de aan/uit knop om snel terug te keren naar de normale modus.

## ZOEKFUNCTIE

Druk 2 seconden op de lijn/balk knop  en houdt deze ingedrukt. De Clover 10 zal dan uitzoomen tot de minimum vergroting en in een kadertje weergeven welk deel van de tekst je vergroot bekeek.

Door de knop los te laten keer je terug naar de originele vergroting.

Je kan eveneens het toestel verschuiven terwijl het kadertje zichtbaar is en loslaten als je het geselecteerde deel van de tekst wil vergroten.

## Geheugen

Het toestel slaat automatisch de laatste setting op wanneer het toestel wordt afgesloten.

## Automatische stroombesparing

Wanneer er gedurende 3 minuten niets met het toestel gedaan wordt, sluit het vanzelf af.

## Fabrieksinstellingen

Je kan het toestel resetten naar de fabrieksinstellingen door 5 seconden tegelijkertijd op de stilstaand beeld knop en de lijn/balk knop te drukken.

## Reset

Wanneer het toestel vastgelopen is, druk dan tegelijkertijd op de aan/uit knop + de stilstaand beeld knop + de kleurenmodusknop tot het toestel zichzelf reset.

## Probleemoplossing

<b>Het toestel gaat niet aan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sluit de adapter aan</li><li>• Zorg ervoor dat de batterij geladen is</li><li>• Reset</li></ul>
<b>Volledig zwart of wit scherm</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ligt het scherm op een vlak oppervlak? Zo ja, neem het toestel op en kijk of er iets verandert.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de vergroting aan</li> <li>• Wijzig de kleurenmodus</li> <li>• Wanneer het toestel met een TV is verbonden, is het scherm altijd zwart</li> <li>• Herstart het toestel</li> <li>• Reset</li> </ul>
<b>Het beeld verandert niet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk of het beeld niet in de stilstaand beeld mode staat</li> <li>• Druk op de aan/uit knop om de huidige status te checken</li> <li>• Herstart het toestel</li> <li>• Reset</li> </ul>
<b>Troebel beeld</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de helderheid aan</li> <li>• Is het scherm proper?</li> </ul>

## ***Garantiebepalingen***

- De garantie bedraagt 2 jaar vanaf de aankoopdatum exclusief de batterij.
- De batterij heeft een garantieperiode van 6 maanden.

## ***Specificaties***

- Display: 10 inch breedbeeld LCD
- Camera: Auto focus, HD
- Afmetingen: <=245 x 200 x 22mm
- Gewicht: 700gram
- Kleurenmodi: 23 modi
- Vergroting: 2,2x – 20x
- Batterij: herlaadbare Lithium batterij
- Gebruiksduur bij volledig geladen: +/- 3,5u
- Laadtijd: +/- 5u
- Adapter: input 110-240V, output 5V/3A

## ***Précautions***

- Avant d'utiliser Clover 10 pour la première fois, vous devez recharger sa batterie. Reportez-vous à la section **Chargement de la batterie** pour plus de détails.
- Toujours utiliser l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F).  
Gardez l'appareil à l'écart des zones humides, de la pluie et d'autres sources de liquides. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Cela annulera la garantie. Contactez votre distributeur pour toute réparation.
- Merci d'utiliser adaptateur secteur et la batterie fournis.
- Chargez la batterie sur une base inflammable et sous supervision.

## ***Démarrage rapide***

Clover 10 est une video-loupe portable de 10 pouces, avec une excellente qualité d'image (Full HD) et possède un large éventail de niveaux d'agrandissement. Le système intègre deux caméras pour offrir trois modes de visualisation, pour répondre à l'usage quotidien (vision de près, de loin et mode Miroir).


Par exemple :

La vision de près : pour lire un livre ou un journal.


La vision de loin : pour lire une affiche ou le tableau noir.

Le mode Miroir : pour se maquiller.


En plus de la fonction de zoom et des différents modes de couleur, il existe également diverses fonctions pratiques, telles que la ligne de lecture, le mode masquage, le gel de l'image, le stockage des images, et, la navigation (au sein des images) pour améliorer l'expérience de lecture.

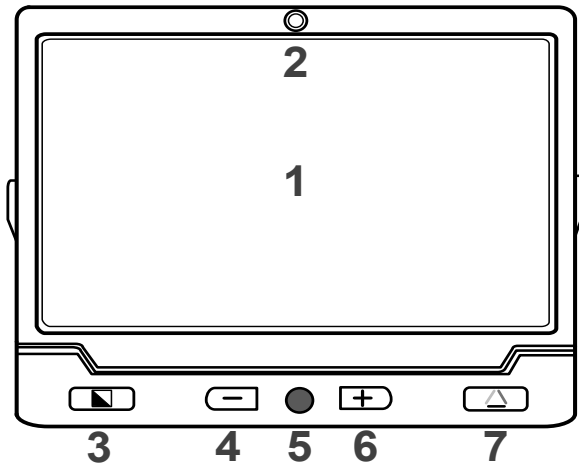


- 1) Écran LCD
- 2) Caméra avant
- 3) Couleurs améliorées
- 4) Zoom moins
- 5) Joystick
- 6) Zoom plus
- 7) Couleur naturelle

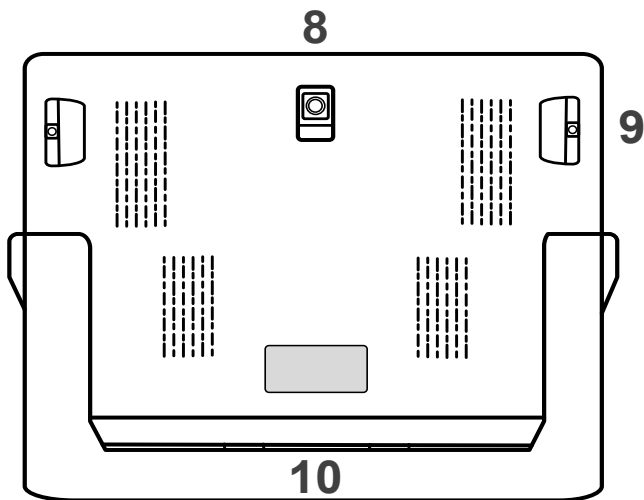

- 8) Camera arrière
- 9) LED's
- 10) Pied

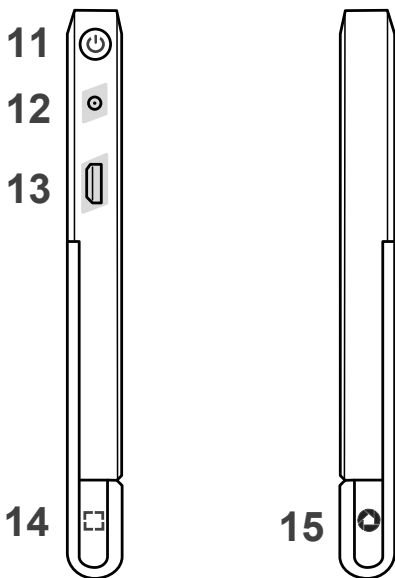

- 11) Bouton power (marche, arrêt)
- 12) Prise de charge
- 13) Port HDMI
- 14) Bouton localiser
- 15) Bouton gel de l'image

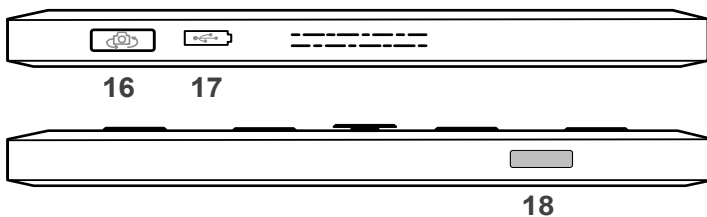


- 16) Changement de caméra
- 17) Port micro-USB
- 18) Focus lock


# Accessoires



Manuel utilisateur

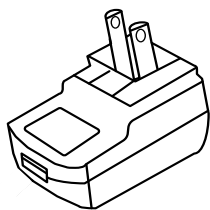


Adaptateur secteur

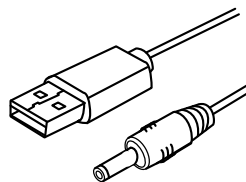


Câble de charge



Lignette de nettoyage

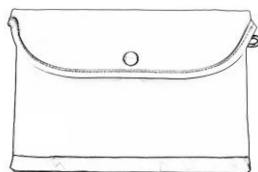


Housse de transport

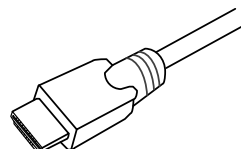

Câble HDMI

## Chargement de la batterie

1. Branchez le câble d'alimentation fourni au secteur.
2. Connectez le câble d'alimentation fourni au port d'alimentation de la loupe.
3. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur et commencez à recharger.

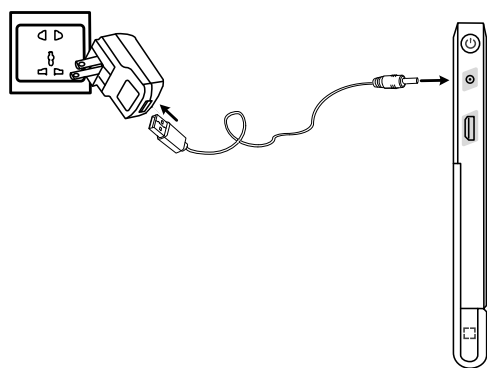

## TÉMOIN LUMINEUX


- Chargement de l'appareil lorsqu'il est éteint : le témoin lumineux est vert, puis s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé. Une charge complète prendra environ 5 heures. Et l'appareil fonctionnera pendant environ 3,5 heures en utilisation continue.

- Lorsque l'appareil est allumé : le témoin lumineux est vert lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur.
- Lorsque l'appareil est allumé et que l'adaptateur secteur n'est pas branché : le témoin d'alimentation est vert lorsque la batterie est pleine et il devient rouge lorsque la batterie est faible.  
Lorsque le témoin rouge commence à clignoter, vous devrez charger la batterie.  
Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie en appuyant sur le bouton **Marche/arrêt (Power)**. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.

## ***Pied de lecture/écriture***

Le pied repliable est utilisé pour une expérience confortable en lecture et en écriture. Dépliez le support comme montré sur la figure suivante.

La caméra arrière est conçue pour pivoter automatiquement en fonction de la position du pied, de sorte que le mode de vision de près ou vision de loin soit pris en charge par l'appareil.

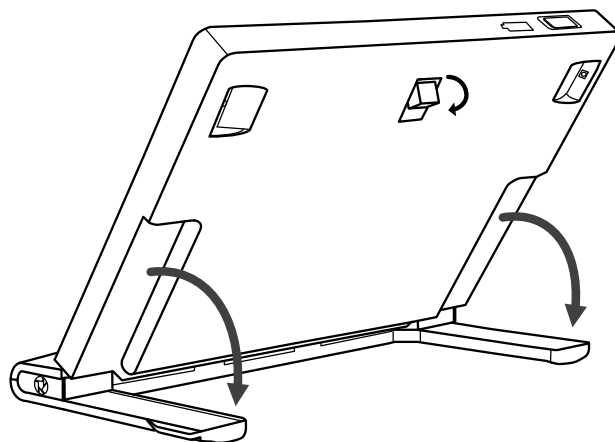

## ***Utilisation de l'appareil***


Bouton Power (marche/arrêt)

- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- Maintenez enfoncé le bouton Power pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.



- Faire un appui court sur le bouton Power pour vérifier l'état de la batterie, du mode de gel de l'image, du mode de couleur et des bips sonores.
- Il existe des fonctions cachées lorsque vous maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt et que vous appuyez sur un autre bouton (Mode Combo), reportez-vous aux instructions suivantes pour plus d'informations.

## LES DIFFÉRENTS TYPE DE BIPS

- Bip marche/arrêt
- Bip des touches
- Bip de limite (zoom minimum ou zoom maximum)
- Bip de niveau de batterie faible

Pour activer ou désactiver les bips, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant vous appuyez le bouton couleur naturelle .

## CHANGEMENT DE CAMÉRA

- Poussez vers la gauche le bouton  **Changement de caméra** : utilisation de la caméra arrière, pour utiliser l'appareil en vision de près et de loin.
- Poussez vers la droite le bouton  **Changement de caméra** : utilisation de la caméra avant, pour utiliser l'appareil en mode Miroir.

## AGRANDISSEMENT




- Appuyez (appui court) sur le bouton **Zoom plus** pour augmenter le grossissement par paliers. Et si vous maintenez enfoncé (appui long) le bouton **Zoom plus**, vous augmentez le zoom plus rapidement (zoom progressif).
- Appuyez (appui court) sur le bouton **Zoom moins** pour diminuer le grossissement par paliers. Et si vous maintenez enfoncé (appui long) le bouton **Zoom moins**, vous diminuez le zoom plus rapidement (zoom progressif).

## MODES DE COULEUR

Un mode couleur est une combinaison de couleurs prédéfinie.

Le mode couleur naturel est adapté pour regarder des images ou des photos, ou bien encore pour visualiser des cartes.

Et le mode couleurs améliorées combine différentes couleurs de caractères et d'arrière-plan, il peut aider à lire plus clairement en améliorant le contraste.

- Appuyez sur le bouton  **Couleurs améliorées** pour faire defiler, dans un sens, la liste des différentes couleurs améliorées.
- Appuyez sur le bouton  **Couleur naturelle** pour revenir au Mode couleur naturelle.
- Maintenez le bouton  **Couleurs améliorées** pendant 5 secondes, pour basculer entre la liste des couleurs améliorées simplifiée (5 modes) et la liste des couleurs améliorées étendue (18 modes).

### Remarque :

Par défaut, la liste des couleurs améliorées étendue est activée.

Liste simplifiée des couleurs améliorées (5 modes) :

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Noir | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Blanc |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jaune sur Noir | <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Bleu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jaune sur Bleu |  |

Liste étendue des couleurs améliorées (18 modes) :

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Noir  | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Blanc  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jaune sur Noir  | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Jaune  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Bleu  | <input checked="" type="checkbox"/> Bleu sur Blanc  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jaune sur Bleu  | <input checked="" type="checkbox"/> Bleu sur Jaune  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vert sur Noir   | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Vert   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Violet sur Noir | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Violet |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bleu sur Noir   | <input checked="" type="checkbox"/> Noir sur Bleu   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Vert  | <input checked="" type="checkbox"/> Vert sur Blanc  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blanc sur Rouge | <input checked="" type="checkbox"/> Rouge sur Noir  |

## LUMINOSITÉ


Ajustement de la luminosité de l'écran, que ce soit en mode Couleur naturelle ou bien en mode Couleur améliorées. La valeur par défaut sera mise en surbrillance en vert.

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Power**, puis appuyez sur le bouton **Zoom plus** pour augmenter la luminosité.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Power**, puis appuyez sur le bouton **Zoom moins** pour diminuer la luminosité.

## ECLAIRAGE LED



Maintenez enfoncé le bouton **Power** et appuyez sur le bouton  **Gel de l'image** pour allumer/éteindre manuellement les LED's.

## FOCUS LOCK

Appuyez sur le bouton **Focus Lock**  pour fixer le focus. C'est surtout utile quand on écrit à la main.

## GEL DE L'IMAGE


Le fait de figer une image (Gel de l'image), sur l'écran LCD, peut être utile pour une lecture plus approfondie et plus précise. Lorsque l'image est figée, vous pouvez augmenter ou diminuer le zoom, changer le mode couleur.

- Appuyez (appui court) sur le bouton  **Gel de l'image** pour figer l'image.
- Appuyez à nouveau (appui court) sur le bouton  **Gel de l'image** pour revenir au mode de lecture normal.

### Remarque :

Lorsque vous avez gelé l'image et augmenté le zoom, vous pouvez utiliser le joystick pour naviguer librement dans la totalité de l'image figée (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite).


## STOCKAGE D'IMAGES

Lorsque l'image est figée, maintenez le bouton  **Gel de l'image** pendant 3 secondes pour enregistrer cette image. Vous pouvez stocker jusqu'à 20 images.






### Remarque :

Lorsque vous avez atteint le nombre maximal d'images enregistrées (20 Images), l'icône de la mémoire apparaît, vous devez donc d'abord supprimer une image, dans la Galerie d'images, avant la prochaine sauvegarde (pour plus de détails, reportez-vous à la prochaine rubrique).

## GALERIE D'IMAGES

- Pour accéder à la galerie d'images, appuyez (appui long) sur le bouton  **Couleur naturelle** pendant 3 secondes.



- Utiliser le joystick pour naviguer dans les miniatures, de la galerie d'images. Une fois l'image à visualiser sélectionnée, appuyez sur le bouton  **Couleur naturelle** pour afficher cette image. Vous pouvez augmenter le zoom, changer les couleurs et naviguer dans l'image avec le joystick. Appuyez sur le bouton  **Gel de l'image** pour revenir dans la grille des miniatures.
- Pour supprimer une image, après l'avoir sélectionnée, appuyez sur le bouton  **Localiser**, puis confirmer en appuyant une seconde fois sur ce même bouton. Appuyez sur un autre bouton pour annuler.
- Pour supprimer toutes les images de la galerie, appuyez (appui long) sur le bouton  **Localiser** pendant 5 secondes. Puis confirmer en appuyant une seconde fois sur ce même bouton. Appuyez sur un autre bouton pour annuler.
- Appuyez (appui long) sur le bouton de  **Couleur naturelle**, pendant 3 secondes, pour quitter la galerie d'images.

## MODES LIGNE ET MASQUAGE

Appuyez sur le bouton **Localiser** pour basculer entre les modes de ligne et masquage.


Les différents modes de ligne et masquage sont :


- Une ligne horizontale
- Une ligne verticale
- Masquage horizontal
- Masquage vertical
- Mode normal (ni ligne, ni masquage)


Utilisez le joystick pour changer la position de la ligne de lecture ou modifier l'écart entre les bandes de masquage. La navigation dans l'image est désactivée dans le mode Ligne et Masquage.

Appuyez (appui court) sur le bouton **Power** pour revenir rapidement au mode normal.

## MODE APERÇU

Pour avoir un aperçu de l'image agrandie, appuyez (appui long) sur le bouton  **Localiser** pendant 2 secondes.

Tout en maintenant le bouton  **Localiser** enfoncé, l'agrandissement passe au zoom minimum (pour avoir un aperçu) et une zone de localisation apparaît, pour représenter la position de l'image agrandie.

Vous pouvez déplacer la zone de localisation sur votre document, puis relâchez le bouton  **Localiser**, l'image retournera au grossissement précédemment utilisé (avec le contenu actualisé).

## NAVIGATION EN TEMPS RÉEL

Utilisez le joystick, en mode vidéo en temps réel, pour naviguer autour de l'image pour plus d'informations.

## *Mémorisation des paramètres*

L'appareil mémorise automatiquement les derniers paramètres utilisateur (tels que le mode de couleur, le grossissement et les bips) lorsque vous éteignez l'appareil normalement. Et les réutilise lors du prochain redémarrage.

## *Extinction automatique*



En cas d'inactivité l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes, pour économiser la batterie.

## *Restauration*

Appuyez (appui long) sur le bouton **Gel de l'image** et le bouton **Localiser**, en même temps, pendant 5 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut.

L'appareil s'éteint automatique lorsque la réinitialisation est terminée.

## *Réinitialisation matérielle*

Lorsque l'appareil est bloqué ou ne peut pas être arrêté normalement, appuyez simultanément sur le bouton **Power**, le bouton  **Gel de l'image** et bouton  **Couleur naturelle** pour déclencher la réinitialisation matérielle.

# Dépannage

<b>L'appareil ne s'allume pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branchez l'adaptateur secteur.</li><li>• Chargez la batterie.</li><li>• Réinitialisation matérielle.</li></ul>
<b>Ecran noir ou écran blanc</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'appareil est posé sur une surface plane et que l'écran est noir ou blanc, soulevez l'appareil pour vérifier si cela change la situation.</li><li>• Ajuster l'agrandissement.</li><li>• Ajuster le mode de couleur.</li><li>• Redémarrer la loupe.</li><li>• Réinitialisation matérielle.</li></ul>
<b>L'image ne change pas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'appareil est en mode Gel de l'image ou en mode galerie d'images, l'image ne change pas.</li><li>• Appuyez sur le bouton <b>Power</b> pour vérifier le gel de l'image et le mode de couleur.</li><li>• Redémarrez la loupe.</li><li>• Réinitialisation matérielle.</li></ul>
<b>En cas de taches sur l'écran</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez la luminosité de l'écran.</li><li>• Nettoyez l'écran LCD et la lentille photo située au dos l'appareil.</li></ul>

## Garantie

Garantie 2 ans (LA BATTERIE EST GARANTIE 6 MOIS).

## Caractéristiques techniques

- Taille de l'écran : Écran LCD de 10 pouces, HD.
- Caméra : Auto Focus, HD.
- Dimensions: 24,5 x 20 x 2,2 cm.
- Poids : 700 grammes.

- Modes de couleurs : Couleur Naturelle. 5 modes de couleurs simplifiés. 18 modes de couleurs étendus.
- Agrandissement : 2,2x à 20x.
- Batterie : Batterie rechargeable Lithium-ion intégrée. Environ 3,5h d'autonomie en utilisation continue. Charge complète environ 5h.

