

Sneltoetsen ZoomText

Uitgebreide handleiding: zie ZoomText Help



Vergroten	Caps Lock + Pijl Omhoog
Verkleinen	Caps Lock + Pijl Omlaag
Positief / negatief	Caps Lock + C
ZoomText aan/uit	Caps Lock + Ctrl + Enter
Stem aan/uit	Caps Lock + Alt + Enter
Stem wisselen	Caps Lock + Alt + V
Stem sneller	Caps Lock + Alt + Pijl Omhoog
Stem trager	Caps Lock + Alt + Pijl Omlaag
Splitscreen aan	Caps Lock + Ctrl + C
Splitscreen uit	X (Caps Lock + Ctrl + C om camera te activeren)
Splitscreen draaien	Caps Lock + Pijl Links/Rechts
Caps Lock	2x Caps Lock

Application Reader

Met de AppReader kan u het lezen starten bij het woord onder de muisaanwijzer. Dit maakt het lezen van documenten, webpagina's en e-mails snel en eenvoudig.

AppReader starten vanaf muis Om lange teksten te lezen	Caps Lock + Alt + Linker muisknop
Lezen starten/stoppen	Enter
Volgende zin	Pijl rechts
Vorige zin	Pijl links
Volgende paragraaf	Pijl boven
Vorige paragraaf	Pijl omlaag
AppReader afsluiten	Esc

KOBA Vision
De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

011 51 70 80
info@kobavision.be
www.kobavision.be

